

Alkolmetre Cihazlarının Temizlenmesi ve Dezenfeksiyonu Hakkında

Covid-19 salgını sebebiyle hem sağlık personelinin, hem de üfleyen şahısların sağlığı ve kişisel güvenliği için çoğunlukla acil servislerde kullanılan alkolmetre cihazlarının temizlik ve dezenfeksiyonun en doğru şekilde nasıl yapılacağına dair bir bilgilendirme / hatırlatma yapmak istedik.

EnviteC marka AlcoQuant 6020 plus alkolmetre cihazının temizlik ve dezenfeksiyonu hakkındaki bilgiler kullanma kılavuzununun 23. sayfasında bulunmaktadır. Üretici EnviteC-Wismar GmbH By Honeywell firmasının önerdiği üzere temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri aşağıdaki gibi yapılmalıdır;

Temizleme

Lütfen cihazı hafif temizlik maddeleri ile nemlendirilmiş tek kullanımlık bez kullanarak bastırmadan temizleyin.

Dezenfeksiyon

Cihazı izopropil alkol ile nemlendirilmiş tek kullanımlık bez kullanarak bastırmadan temizleyin. (EN 60601-1)



Temizlik ve dezenfekte esnasında cihazın batarya kapağını kapalı tutun. Cihaz temizlik esnasında nemlenmemelidir.

Cihazın içerisinde bulunan parçalar (pil / batarya) ve USB portu cihazın düzgün çalışması için kuru ve temiz olmalıdır.



Temizleme/dezenfeksiyon sırasında alkol kullanılmışsa, bir sonraki ölçüme kadar bekleme süresi en az 15 dakikadır.

Hijyenik kullanım için hijyenik olarak üretilmiş tek kullanımlık ağızlıklar kullanın.